

Flexibel und soft konvex für mehr **Komfort** und **Halt**¹

Der eakin **dot**[®] 2-Teiler soft konvex bietet eine sicherere und komfortable Passform und gleichzeitig eine sanfte und flexible Unterstützung, um Stomata hervorstehen zu lassen.¹

Die weiche, mit Schaumstoff bezogene, konvexe Basisplatte bietet einen sanften, gleichmässigen Druck und bietet mehr Komfort, Flexibilität und bessere Unterstützung rund um das Stoma.¹



Entwickelt für mehr Flexibilität, damit **keine Druckstellen entstehen, die Geschwüre verursachen**¹



Bietet **höheren Komfort**¹



Passt sich Körperkonturen **an**¹



Bietet **mehr Unterstützung** rund um das Stoma¹

„Nach 40 Jahren mit einer anderen Marke wechsele ich nun zu eakin dot[®]“

Kaj, Dänemark



skinsmart[™] Hydrokolloid für eine längere **Tragezeit**

Auf Grund der herausragenden Eigenschaften unseres *skinsmart*[™] Hydrokolloids für eine längere Tragezeit, **haftet** die Basisplatte von eakin **dot**[®] soft konvex sofort und sicherer an der Haut und bietet gleichzeitig eine **längere Tragedauer** der Versorgung.¹



Haftet sofort auf der Haut¹



Bietet **mehr Sicherheit**¹



Längere Tragezeit¹



Anwender sehen unser Hydrokolloid als **hautfreundlicher**¹

„Meine Haut fühlt sich besser an ...Ich werde weiterhin eakin dot[®] 2-Teiler soft konvex nutzen“

Kjeld, Dänemark



So bestellen Sie die **eakin dot[®] 2-Teiler Beutel**

Geschlossene Beutel

Artikelnummer	Beutelgrösse	Rastring	Packungsgrösse
839900	Mini	60mm	30
839901	Standard	60mm	30
839902	Maxi	60mm	30
839920	Standard	80mm	30
839921	Maxi	80mm	30

Ausstreifbare Beutel

Artikelnummer	Beutelgrösse	Rastring	Packungsgrösse
839903	Mini	60mm	30
839904	Standard	60mm	30
839905	Maxi	60mm	30
839922	Standard	80mm	30
839923	Maxi	80mm	30


Denken Sie daran, mit dem eakin dot® 2-Teiler soft konvex ist es einfach, den Beutel kontrolliert anzubringen und zu entfernen

1. Der violette ausklappbare Rastring

erleichtert das Anbringen des Beutels bei schwer sichtbaren Stomata oder bei Personen mit Sehbehinderungen und minimiert gleichzeitig den Druck auf den Bauch während des Anbringens des Beutels

„...Der Beutel lässt sich leicht auf der Basisplatte anbringen...der ausklappbare Ring ist genial!“¹

Anwender, Dänemark

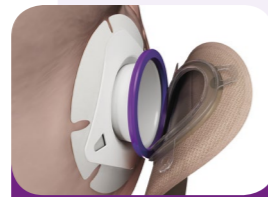

1. AUSKLAPPBAR

2. Das hörbare KLICKEN gibt eine zusätzliche Bestätigung, dass der Beutel und die Basisplatte sicher verbunden sind

„...Der hörbare KLICK macht das Anbringen des Beutels einfach...“¹

Anwender, UK



2. KLICK

3. Die einzigartige Abziehhilfe zum Entfernen bietet Anwendern einen kontrollierten Beutelwechsel (ideal auch für Pflegekräfte, wenn sie Stoma-Trägern helfen, die Unterstützung benötigen oder für diejenigen mit speziellen Anforderungen)

„Ich hatte heute eine Mutter zum Beutelwechsel Ihres Kindes hier – hat problemlos geklappt!“²

Stoma-Fachkraft:

Children's Sydney Hospital, Australien



3. ABZIEHEN

eakin dot®

eakin dot® 2-Teiler soft konvex

Versorgen Sie Stomata auf und unter Hautniveau einfacher¹

Entwickelt für mehr Flexibilität



So bestellen Sie die eakin dot® 2-Teiler soft konvex Basisplatten

Artikelnummer	Stomagröße	Rastring	Packungsgröße
839820	ausschneidbar 15-40mm	60mm	5
839821	20mm	60mm	5
839822	22.5mm	60mm	5
839823	25mm	60mm	5
839824	27.5mm	60mm	5
839825	30mm	60mm	5
839826	32.5mm	60mm	5
839827	35mm	60mm	5
839828	37.5mm	60mm	5
839829	40mm	60mm	5
839830	ausschneidbar 15-60mm	80mm	5

Fordern Sie **Muster an**



Tel. +43 (0)7229/63 902
info@publicare-plus.at

publicare plus

eakin®

A SMALL PART OF A BIGGER LIFE.

TG Eakin Ltd, 15 Ballystockart Road, Comber, Co. Down, BT23 5QY
www.eakin.eu

1. eakin dot® 2-piece soft convex user evaluations, Data on File, 2019.
2. eakin dot® 2-piece nurse case study, Data on File, 2018.

ED2PCONFI.1(AT)