

eakin cohesive® Hautschutzpaste

Alkoholfreie, nicht brennende haftende
Paste für Stomata, Fisteln und die
Wundversorgung



A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE.

Hautfreundliche Füllmasse für einen effektiven Auslaufschutz

Gute Gründe, die für die cohesive® Hautschutzpaste von eakin sprechen:

Überall dort, wo einerseits sensible, entzündete, irritierte Haut vor Ausscheidungen geschützt werden soll und andererseits eine Stomaversorgung angebracht und vor allem bis in kleinste Hautfalten abgedichtet werden soll, kommt diese einzigartige Paste zum Einsatz.

eakin **Cohesive**® nimmt maximal und kontinuierlich Feuchtigkeit auf.

eakin **Cohesive**® dichtet optimal ab und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nicht mit der Haut in Berührung kommt.

Ein entscheidender Faktor, um Hautentzündungen zu vermeiden.

- 1. Hautfreundliche Füllmasse** Die Paste enthält keinen Alkohol und ist somit ideal für zarte, empfindliche und bereits angegriffene Haut.
- 2. Schafft ideales Hautoberflächenniveau** Die Paste bildet eine Barriere und optimiert das Hautoberflächenniveau. Dies beugt Leckagen vor und die Stomata, Fisteln oder Wunden sind optimal geschützt.
- 3. Dient als Füllelement für Hautrisse, Hautfalten und Wunden.** Dies hilft, um die Tragezeit der Stoma- und Wundbeutel zu verlängern.

Zur Verwendung im Stomamanagement

Lösung

Ein Ileostoma wurde zu nahe an der Bauchmitte angelegt. Das Resultat war das Ausbilden einer Bauchfalte, was es schwierig machte, die Stomaversorgung anzubringen.

eakin **Cohesive**[®] Paste wurde als Füllmaterial für die Bauchfalte verwendet und mit dem zusätzlichen Anbringen eines eakin **Cohesive SLIM**[®] Hautschuttrings als erweiterter Hautschutz konnte ein normaler, angenehmer Beutelwechsel gewährleistet werden.



Zur Verwendung im Wundmanagement

Lösung

Patient leidet an einer enteroatmosphärischen Fistel.

Eine Vakuumtherapie verlief erfolglos.

Mit einer Kombination aus eakin[®] Wund- und Fistelbeuteln, eakin **Cohesive**[®] Hautschutzplatten und eakin **Cohesive**[®] Hautschutzpaste als Füllelement konnte ein intakter, täglicher Beutelwechsel erzielt werden.



Zur Verwendung im Fistelmanagement

Lösung

Patient leidet an einer stark ausgeprägten Fistel mit bereits perforiertem Divertikel und sehr starker Exsudation.

Entlang der Wundnaht und in den Hautfalten wurde eakin **Cohesive**[®] Paste als Füllelement eingesetzt. Um die Sicherheit der Wundumgebung und den Heilungsprozess der irritierten Haut zu gewährleisten, wurde zusätzlich ein großer eakin **Cohesive**[®] Hautschuttring um die Fistel herum appliziert.

Die Fistel konnte fortan wieder normal versorgt werden.



Anwendung

Einfach nach Bedarf direkt auf die Haut drücken und mit den Fingern verteilen.

Die Cohesive® **Hautschutzpaste** kann zusammen mit den eakin® **Hautschutzringen**, den Stoma- sowie den Fistel- und Wundbeuteln für optimale Sicherheit und Auslaufschutz verwendet werden.

Bestellinformation

	Packungsinhalt	Artikelnummer
eakin cohesive® paste	60g	839010

Fordern Sie
telefonisch Muster an



Tel. +43 (0)7229/63 902

info@publicare-plus.at

www.publicare-plus.at

••• publicare
plus