

eakin **surround**[™] Hautschutzpad

Zur Fixierung von Sonden, Kathetern
und Drainagen.



Die wesentlichen Vorteile der Hautschutzpads

Die Pads bieten eine besonders verträgliche Fixierung mit **eakin Cohesive® Hautschutz** und einen wasserdichten und bakterienabweisenden Schutzfilm.

- ✓ Absorbiert Hautfeuchtigkeit, z.B. bei Patienten mit Transpiration.
- ✓ Reduziert Hautirritationen und unterstützt den Heilungsprozess.
- ✓ Flexible und sichere Fixierung.
- ✓ Atraumatischer, rückstandsfreier Versorgungswechsel
- ✓ Erleichtert die Pflege und erhöht den Komfort für die Patienten.

Anwendungsgebiete

Der **eakin surround™** Hautschutz ist sehr vielseitig einsetzbar und kann in vielen Anwendungen wirksam verwendet werden, wie beispielsweise:

- PEG-Sonden
- sämtliche Drainagen
- Ace-Druckschläuche
- Tracheokanülen
- Katheter

Anwendung



Säubern und trocknen Sie die Umgebung.



Entfernen Sie die Schutzfolie.



Platzieren Sie das Surround™ Hautschutzpad auf der betroffenen Stelle, sodass sich die zwei Enden überlappen, um somit eine stärkere Abdichtung zu erzielen.



Drücken Sie sanft auf den Rand des Hautschutzpads, bis es sicher hält.

Bestellinformation

	Durchmesser	Packungsgröße	Artikelnummer
eakin surround TM Hautschutzpad, groß	98mm	10	839011
eakin surround TM Hautschutzpad, klein	58mm	20	839012

Fordern Sie
telefonisch Muster an



Tel. +43 (0)7229/63 902
info@publicare-plus.at
www.publicare-plus.at

••• publicare
plus