

Ursachen für Erektionsstörungen können mannigfaltig sein, wie zum Beispiel:

- Radikale Beckenchirurgie (Prostatektomie, Kolektomie, Zystektomie)
- Diabetes mellitus
- Hypertonie
- Herz-Kreislaufkrankungen
- Gefäßerkrankungen
- Neurogene oder psychogene Störungen
- Medikamenteneinnahme
- Übermäßiger Alkohol- oder Nikotinkonsum

Bei spezifischen Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

Die Vakuumtherapie ist eine kostengünstige sowie nebenwirkungsarme Alternative zu Arzneimitteln.

Ihre Vorteile sind:

- Schnelle Erektion
- Einfach, sowie sicher in der Handhabung
- Verbesserung der penilen Rehabilitation
- Sehr gute Behandlungsergebnisse
- Unbedenklich in der Häufigkeit der Anwendung

Wir beraten Sie gerne und stehen für Fragen zur Verfügung:

Salzburg, Oberösterreich, Tirol

Eleonore Lindinger

telefon: 0664 190 01 11

e-mail: eleonore.lindinger@publicare-plus.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland Nord

Katrin Nagel-Eßl

telefon: 0664 152 06 88

e-mail: katrin.nagel@publicare.at

Anna Pozoga

telefon: 0664 100 95 81

e-mail: anna.pozoga@publicare.at

Steiermark, Kärnten, Burgenland Süd, Osttirol

Silvia Gradenegger

telefon: 0664 105 06 56

e-mail: silvia.gradenegger@publicare.at



publicare plus gmbh
an der trauner kreuzung 1
4061 pasching

e-mail info@publicare-plus.at
telefon +43 7229 - 63 902
telefax +43 7229 - 63 902 69

www.publicare-plus.at



VAKUUM THERAPIE SYSTEME

EREKTILE DYSFUNKTION

DAS TRAINING FÜR DEN MANN

www.publicare-plus.at

Vakuumentherapie



Die Vakuumpumpe, wahlweise manuell oder batteriebetrieben, welche einen Unterdruck in einem Kunststoffzylinder erzeugt, bietet eine konservative Behandlungsmöglichkeit der erektilen Dysfunktion.

Durch das hierbei entstandene Vakuum wird Blut aus den Beckenvenen in die Schwellkörper geleitet.


Die gewünschte Erektion wird durch einen vorher auf dem Zylinder applizierten und anschließend auf der Peniswurzel übergestreiftem Spannungsring erhalten.

Anwendung

Streifen Sie mit Hilfe der Aufziehspitze den Spannungsring über den Zylinder.


Anschließend entfernen Sie die Aufziehspitze und bringen stattdessen den Adapterring an.

Nach der Vorbereitung des Pumpsystems findet die Anwendung in kurzen Schritten statt.

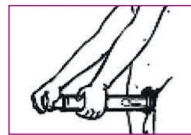


Schritt 1

Gel auf der Innenseite des Pumpenzylinders und auf dem Penis anbringen.

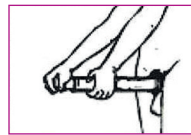


Schritt 2

Penis in vorbereiteten Zylinder einführen.

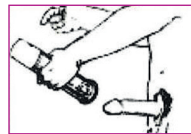

Schritt 3

Vakuum mittels Pumpe erzeugen.

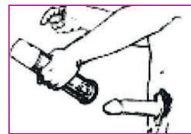

Schritt 4

Ring vom Zylinder auf Peniswurzel anbringen.

Eine genauere Anleitung können Sie der mitgelieferten Broschüre entnehmen.

Pumpensysteme

AVP 1000 / Bos 2000-2 € 240,00

Vakuumpumpe batteriebetrieben inkl. Zylinder, Pumpenkopf, Aufziehspitze, Adapterring, Spannungsringe, Gel, Tasche, Anleitung

IVP 600 € 240,00

Vakuumpumpe handbetrieben inkl. Zylinder, Pumpenkopf, Aufziehspitze, Adapterring, Spannungsringe, Gel, Tasche, Anleitung

Spannungsringe Ultimate II Round*

Nr. X	extra klein	€	8,40
Nr. 1	klein	€	8,40
Nr. 2	klein/mittel	€	8,40
Nr. 3	mittelgroß	€	8,40
Nr. 4	groß	€	8,40

Gel € 8,48

* Preis pro Stück, Mindestabnahme 2 Stück
Alle Preise inkl. MwSt (20%)